

Do użytku w połączeniu z szybkim przewodnikiem Finetest Lite.

Korzystanie z glukometru Finetest Lite (patrz także skrócona instrukcja obsługi zawarta w pudełku).

1. Wyjmij jeden pasek testowy Finetest Lite z garnka i zamknij pokrywę.
2. Włóż pasek testowy do glukometru Finetest Lite.
3. Miernik włączy się automatycznie.
4. Pojawi się numer kodu, a następnie migająca kropla krwi. Miernik jest teraz gotowy do testowania.
5. Użyj urządzenia do nakłuwania, aby pobrać próbkę krwi na opuszek palca.
6. Przyłóż koniec paska testowego do próbki krwi, patrz przewodnik.
7. Wynik badania poziomu glukozy we krwi pojawi się za 5 sekund.
8. Wsuń pasek testowy do pojemnika.

Korzystanie z urządzenia do nakłuwania. (patrz także skrócona instrukcja obsługi w ramce).

1. Użyj nowego lancetu do każdego testu.
2. Odkręć górną część długopisu do nakłuwania.
3. Całkowicie włóż nowy lancet i zdejmij nasadkę.
4. Załóż pokrywę.
5. Dostosuj ogranicznik głębokości do osobistych preferencji.
6. Zalej wstrzykiwacz lancetowy, odciągając tłok do tyłu.
7. Umieść urządzenie do nakłuwania na stronie testowej i naciśnij przycisk, aby użyć.
8. Wykonaj test glukozy we krwi szybko ze świeżą krwią.
9. Usunąć zużyty lancet i usunąć go w bezpieczny sposób.