

URDU.

لائٹ فوری شروع گائیڈ کے ساتھ مل کر استعمال کیا جا کرنے کے لئے Finetest.

لائٹ خون گلوکوز میٹر (بھی باکس میں شامل فوری شروع گائیڈ دیکھیں) کا استعمال کرتے ہوئے Finetest.

1. لائٹ ٹیسٹ کی پٹی کو ہٹا دیں اور ڈکن بند کریں Finetest پٹی کے برتن سے ایک.
 2. لائٹ میٹر میں داخل کریں Finetest ٹیسٹ کی پٹی کو.
 3. میٹر خود کار طریقے سے چالو ہوجائے گا.
 4. کوڈ نمبر ایک چمکتا خون بوند کے بعد دکھایا جائے گا. میٹر اب ٹیسٹ کرنے کے لئے تیار ہے.
 5. ایک کوانٹٹی پر ایک خون نمونہ حاصل کرنے کے لئے لینسیٹ آلہ استعمال کریں.
 6. ٹیسٹ پٹی کے اختتام کو خون کے نمونے میں رکھو، گائیڈ دیکھیں.
 7. خون میں گلوکوز ٹیسٹ کا نتیجہ 5 سیکنڈ میں ظاہر ہوگا۔
 8. ٹیسٹ کی پٹی کو ٹوکری میں نکالیں.
- لینسیٹ آلہ کا استعمال کرتے ہوئے)۔ باکس میں فوری شروع گائیڈ بھی دیکھیں)
1. ہر ٹیسٹ کے لئے ایک نیا لینسیٹ استعمال کریں.
 2. unscrew لینسیٹ قلم کے اوپر.
 3. مکمل طور پر نیا لینسیٹ داخل کریں اور ٹوپی کو ہٹا دیں.
 4. ڈکن تبدیل کریں.
 5. ذاتی ترجیح کو گہرائی گیج کو ایڈجسٹ کریں.
 6. غواص واپس لینسیٹ ہیئج کی طرف سے اعظم کی طرف سے قلم.
 7. ٹیسٹ سائٹ پر لینسیٹ آلہ رکھیں اور استعمال کرنے کے لئے بٹن دبائیں.
 8. خون کے گلوکوز کو فوری طور پر تازہ خون کے ساتھ ٹیسٹ انجام دیں۔
 9. استعمال شدہ لینسیٹ اور بحفاظت کے تصرف کو ہٹا دیں.